


MANUEL DE L'UTILISATEUR

PEDIAFIX, système autonome de positionnement.
Réf. EIM109

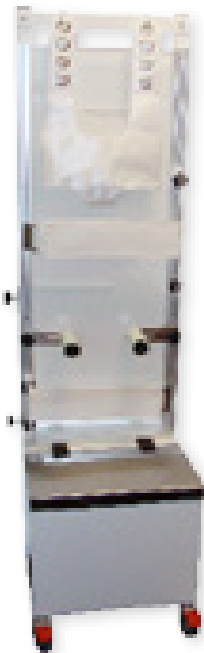

Instructions générales	2
Déballage, stockage	2
Conseils de sécurité	3
Recommandations	3
Responsabilité du fabricant	4
Obligations de l'utilisateur	4

Mise en place du matériel	4
Mise en place du patient	7
Conseil d'entretien et de désinfection	8
Maintenance et service	8

Compatibilité	8
Options	8
Caractéristiques	9

Garantie	9
Coordonnées du fabricant	10

Introduction

Fonctionnement

Caractéristiques

Garantie

* Les indications qui suivent vous sont données pour une bonne utilisation du matériel, nous vous prions de les lire attentivement.

Instructions générales

Système conçu afin de positionner un bébé, un enfant, un adolescent ou un adulte dans les meilleures conditions de confort et de sécurité.

Spécialement étudié pour que le praticien soit dans les meilleures conditions de travail lors des examens d'imagerie médicale dans une salle «capteur plan», mais aussi en conventionnelle.

Ce système autonome doit être uniquement utilisé pour des examens dédiés à l'imagerie médicale.

Déballage, stockage

Vous venez de recevoir votre Pédiafix.

Avant tout veuillez :

- à ce que le carton soit en bon état.
- si le carton est abîmé ou vous paraît suspect, vous devez le signaler au transporteur et notifier sur le bon de livraison l'étendue des dégâts.

Au déballage veuillez :

- à ce que le matériel soit dans un état impeccable, sans coups ni rayures.
- à ce que toutes les fonctionnalités soient en état de marche.
- en cas de problème, vous devez le signaler au transporteur et notifier sur le bon de livraison l'étendue des dégâts.

ATTENTION : Toutes inscriptions sur le bon de livraison «*sous réserve de vérification*» n'ont aucune valeur juridique.

Seul un constat écrit lors de la réception du matériel a valeur.

Lors du stockage magasin ou entrepôt, le matériel doit toujours rester dans son carton d'origine, à l'abri de la pluie et des intempéries. Lorsque le matériel n'est plus utilisé, le stocker dans un endroit à l'abri du passage et des mouvements des machines se trouvant dans la salle.

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Conseils de sécurité

Veuillez respecter les indications suivantes :

Lire les instructions qui suivent avant d'utiliser le pédiifix.
Chaque détail est une précaution de sécurité qu'il convient de respecter.



DANGER : un usage inapproprié entraînerait un risque de blessure grave.



ATTENTION : un usage inapproprié entraînerait un risque pour le matériel.



DANGER : ne pas perdre des yeux le patient.



DANGER : risque de collision avec le matériel environnant.



DANGER : Pour toute question ayant un rapport avec le rayon X (Dose, protection corporelle, etc...) se référer au PCR (personne compétente en radioprotection) de votre établissement.



POIDS : maximum en charge 150 Kg

Avant toute utilisation du matériel, s'assurer :



- du parfait état de fonctionnement.



- que les sangles, et autres éléments de sécurités soient bien en place.



- que l'état de santé du patient soit suffisant pour rester sur le Pédiifix sans aide.



- que le patient ne soit pas sujet au vertige.



- ne jamais laisser un patient sans qu'il soit sanglé.



- qu'un bébé ne soit pas sanglé trop fort.

Recommandations



- Ne pas désassembler, réparer ou modifier le matériel.



- Ne pas utiliser un matériel montrant un dysfonctionnement.

Dysfonctionnements possibles :

- Roue cassée.
- Système de blocage endommagé.
- Sangles déchirées ou abîmées.
- Culotte déchirée.
- Visserie ou bouton de serrage manquant.

Responsabilité du fabricant

La société **NEWMEDI** se décharge de toute responsabilité en cas de non respect des consignes de sécurité, d'une mauvaise utilisation ou d'un mauvais stockage.

La responsabilité repose uniquement sur le médecin responsable de l'examen, nous vous rappelons que tout usage de ce système de positionnement doit être fait par du personnel qualifié.

Voir page 9 «Garantie».

Obligations de l'utilisateur




L'utilisateur est tenu de s'assurer que le Pédiatrix est employé exclusivement aux fins auxquelles il est destiné, à savoir un examen d'imagerie médicale, de mettre tout en oeuvre pour le bon déroulement de cet examen et que toutes les conditions de sécurité soient respectées conformément aux instructions du présent manuel.

De toujours laisser ce manuel à la portée de l'utilisateur.

Mise en place du matériel

Avant tout, lire le manuel dans sa totalité.

- 1- Rail
- 2- Fixation bassin ou tête, (kit A).
- 3- Poignée fixe sangle
- 4- Box de rangement.
- 5- Support de culotte.
- 6- Culotte.
- 7- Sangle de maintien.
- 8- Jeu de cales
- 9- Bandes auto-agrippantes.

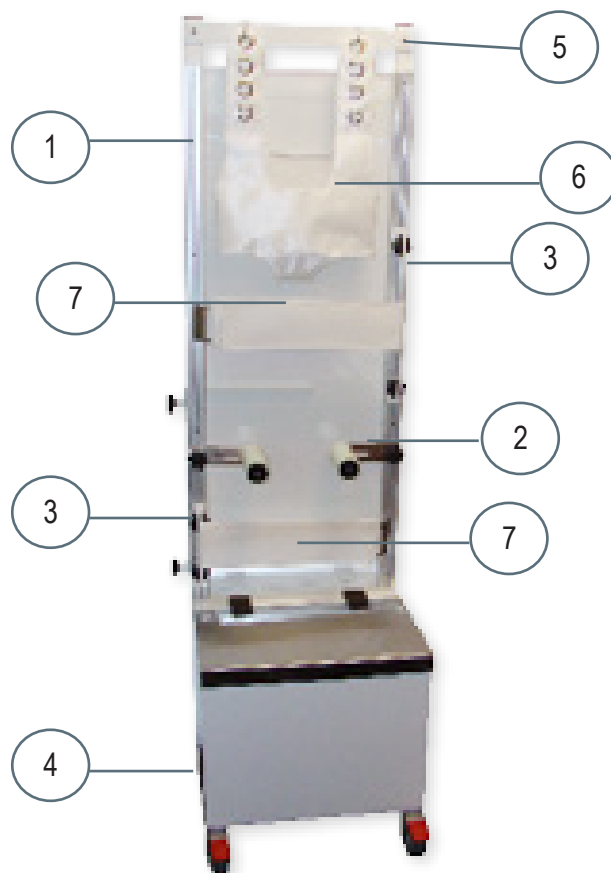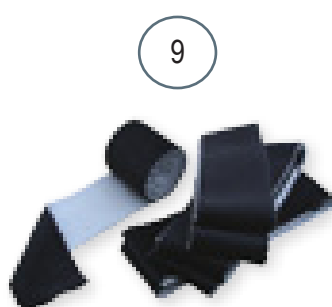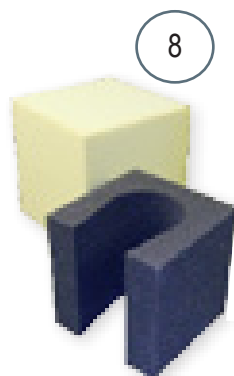

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Mise en place du matériel

En fonction de votre examen, plusieurs combinaisons sont possibles.

Tout d'abord, pour la mise en place des accessoires, il vous suffit de desserrer puis resserrer des boutons. Enfilez par le haut du rail, pour faciliter le glissement, appuyez légèrement vers ou sur le rail.

La culotte serra positionnée sur chaque crochet situé en haut du Pédiafix.

La mise en place de la sangle, se fait à l'aide des crochets venant se fixer sur le rail.

Cette sangle de contention, ne doit être installée que par du personnel qualifié et sous l'entière responsabilité du médecin.



Mise en place du patient

Un enfant, un adolescent ou un adulte sera assis sur le box (4) puis sanglé avec la bande (7).



Pour tout examen, les 4 roues seront bloquées.




Veillez à ce que les crochets des sangles soient bien en place, à ce que le patient ait le dos bien plaqué contre le plexiglas.

Pour le reste, utilisez vos procédures habituelles.




Un bébé ou un petit enfant sera positionné sur la selle en plexiglas, deux possibilités :

Assis sur la cale

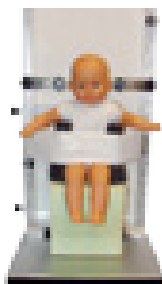

1- la tête sera maintenue à l'aide du kit (A), Fig. 1

Fig. 1

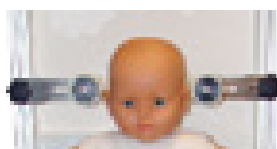

2- Le bassin peut être maintenu à l'aide du kit (A), afin d'éviter que le bébé ne glisse.



MANUEL DE L'UTILISATEUR

Mise en place du patient, suite


Un nourisson ou un petit bébé, sera installé dans la culotte (6).

L'enfant sera préparé et installé dans la culotte sur une table ou chariot dédié à cela.

Une fois fait, la culotte sera suspendue par les crochets Fig. 2.

Pour le reste, utilisez vos procédures habituelles.

Fig. 2

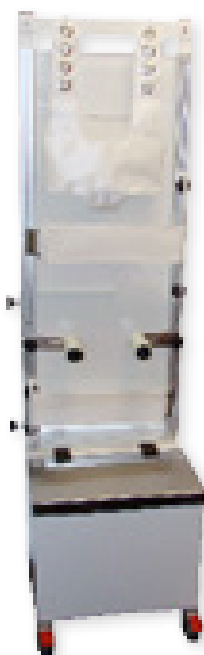

Recommandations importantes :

L'emploi de ce système, doit être fait par du personnel qualifié, sous la responsabilité du médecin.

Il est préférable de toujours mettre un linge sur la selle.

Nous recommandons de surveiller sans relâche le patient tout au long de l'examen.

Afin d'assurer un maximum de sécurité et d'efficacité, il est indispensable d'ajuster au mieux la tensions de serrage des bandes de contentions et des sangles.

Conseils d'entretien et de désinfection

Eviter tout produit oxydant à base de dérivés chlorés (eau de javel) et les dérivés oxygénés (acide paracéthique).
Eviter l'accumulation de solution de nettoyage entre deux pièces.

La fréquence des nettoyages ainsi que le choix du produit dépendent uniquement du projet et des instructions de l'utilisateur.

Nous vous conseillons un nettoyage sous le robinet, puis avec une solution en spray suivi d'un essuyage avec une lingette désinfectante de marque «BACOBAN», nous consulter.

Cette marque étant la seule à avoir un produit de désinfection à base d'eau et non d'alcool.

Tout nettoyage sera essuyé avec soins.

Les bandes peuvent être nettoyées à la machine 30° maxi.

Maintenance et service

Afin d'assurer une efficacité permanente, nous vous conseillons une inspection régulière.



- Inspection journalière visuelle du Pédiatrix, des fixations et des bandes de contention.

Notre service technique est en permanence à votre disposition pour vous fournir tous renseignements complémentaires.
Contact en fin du manuel.

En cas de d'usure ou de casse nous vous conseillons de les remplacer par des pièces d'origines.

En cas de commande de pièces détachées, vous adresser au fournisseur chez lequel a été acheté le matériel.

Compatibilité

Le Pédiatrix est compatible avec tous les services d'imagerie médicale, avec capteur plan ou conventionnelle.

Sous réserve d'un environnement propice à l'utilisation ou d'une machine non testée par notre service.

Options

Lampe infra-rouge, pour réchauffer les bébés.

Chariot de préparation pour bébé.

Bandes de contentions «Magic Strips»

Consultez votre distributeur habituel.

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Caractéristiques

Statif:

- Matière Acier, inox et Polycarbonate 6 mm.

Poids :

- A vide 41 Kg
- Poids maximum autorisé 150 Kg

Stockage :

- Volume 51 x 40 cm x H = 185 cm
- Température +5° C à +40° C
- Humidité 10% à 90%

Identification :

- Classification CE 93/42/CEE Classe I
- Type d'installation Equipement mobile

Garantie

Nous garantissons nos produits contre tout défaut de fabrication dans des conditions normales d'utilisation pendant un an à dater de la mise en circulation sur le site d'imagerie médicale.

Dans le cadre de cette garantie, les obligations de la société NEWMEDI se limitent à la réparation ou au remplacement du produit ou des pièces détachées qui se révéleraient défectueuses, sous réserve que le produit ait été correctement installé et utilisé conformément au MANUEL UTILISATEUR. NEWMEDI se réserve le droit de procéder à une inspection, si cela s'avérait nécessaire, pour établir la cause du défaut. La garantie concerne le remplacement des pièces et la main d'oeuvre correspondante, qui ne seront pas facturés.

Cette garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :

- Dommages ou pertes résultant d'une catastrophe naturelle telle qu'incendie, tremblement de terre, inondations, foudre, orage, etc...
- Dommages et pertes résultant d'un usage déraisonnable ou erroné, d'un abus, d'une négligence ou d'un entretien inadéquat du matériel.
- Dommages et pertes résultant d'une réparation défectueuse, d'une modification du matériel par une personne extérieure à la société NEWMEDI.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. D'autres droits peuvent s'y ajouter dans votre pays.

Pour bénéficier du service lié à cette garantie, vous devez nous faire parvenir un courrier recommandé décrivant le problème rencontré, ou contacter votre fournisseur.

En aucun cas vous ne pouvez renvoyer le matériel sans l'accord express de la société NEWMEDI.

À la réception de votre plainte, NEWMEDI pourra choisir, soit de faire réparer le matériel sur site, soit d'organiser un retour atelier.

Cette Garantie n'est pas transférable, elle n'est valable que sur le site d'origine et à une seule adresse.

Cette garantie écrite est la seule émise par NEWMEDI. La réparation ou le remplacement fourni par cette garantie sont les seuls remèdes proposés aux acheteurs. NEWMEDI ne pourra être tenu responsable d'une perte d'usage du matériel.



NEWMEDI - 15 avenue de Norvège 91 944 COURTABOEUF
Tél.: 05 49 41 34 40 - contact@newmedi.fr

«Toutes les illustrations et photographies présentent dans ce formulaire sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et de ce fait, ne sont pas contractuelles.»

* Prenez soins de noter ces informations :

Date d'achat :	Nom du fournisseur :	N° de série :